

認証番号：15700BZZ00001000

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材・粉末型
JMDNコード 16388010

新ファストン

新ファストンは、水分を含むと粘着力を発揮する天然原料『カラヤガム』により、入れ歯と歯ぐきを一時的につける総入れ歯安定剤です。入れ歯と歯ぐきのすき間が小さな方、新しい入れ歯がなじまない方、違和感があるといった方におすすめします。

特長

- 粉末タイプなので薄くついて違和感が少なくご使用になれます。
- 天然原料カラヤガムが主成分なので、ネバつかず程よい粘着力を発揮します。
- 入れ歯をはずした後の不快なベタつきが少なく、水ですすぐだけで口の中がスッキリします。
- 金属床の入れ歯にも使うことができます。

【禁忌・禁止】

次の人は使用しないこと。

- 1.本品又はアルコールによる過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
- 2.入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。
- 3.食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる恐れがある。)

【形状、構造及び原理等】

【成分】カラヤガム末、l-メントール、エタノール(アルコール含有)

【形状】淡灰色～淡赤褐色の粉末状

【原理】入れ歯と口腔粘膜とを粘着力で維持させる

【品目仕様】粘着の強さ 5kPa以上、pH値 4～10

【使用目的又は効果】

義歯床の安定用

【使用方法等】

1.使用方法

- ①入れ歯を流水できれいに洗います。(前回使用した新ファストンが入れ歯に残っていないようにきちんと洗ってください。)
- ②入れ歯がまだ湿っている間に、入れ歯の歯ぐきや上あごに当たる部分に新ファストンをまんべんなくふりかけます。薄く均一にふりかけるのがコツです。(歯ぐきや上あごに直接新ファストンをふりかけることはおやめください。)
- ③余分な粉末は入れ歯を軽くたたいて、ふり落してください。
- ④そのまま入れ歯をお口にはめ込み、数秒間おさえます。

2.使用可能な入れ歯の材質、種類

○：使用可能 ×：使用不可

入れ歯の材質		入れ歯の種類		
プラスチック床	金属床	総入れ歯	部分入れ歯	ブリッジ、さし歯
○	○	○	×	×

3.洗浄法

入れ歯や口に残った本品は、ガーゼやティッシュペーパーなどでふき取ってください。入れ歯は歯ブラシなどでブラッシングして、流水で水洗いしてください。

【使用方法に関する注意】

使用中又は使用後に注意すること。

- 1.本品をつけた入れ歯は必ず就寝時にはずすこと。
- 2.本品をつけたまま入れ歯を乾燥させないこと。(固まって取りにくくなることもある。)

【使用上の注意】

- 1.長期連用しないこと。連用する場合には歯科医師に相談すること。(歯ぐきがやせる、噛み合わせが悪くなることもある。)
- 2.本品の使用後又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。
- 3.歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整を相談すること。
- 4.本品の使用により刺激感などの異常を感じた場合には使用を中止すること。

【保管方法】

- 1.小児の手が届かない所に保管すること。
- 2.直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりとめて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】ライオン株式会社

【問合せ窓口】

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

【お問合せ先 0120-813-752(お客様センター)】 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



- 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とすること。
- 定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行うこと。