

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# スマイルコンタクトファインフィット

コンタクトレンズ装着薬 指定医薬部外品

コンタクトレンズを使用していると、レンズのゴロゴロ感、異物感、乾きなどの不快感を感じることがあります。これは、涙の量が少なくなっていて、瞳に負担をかけているのです。

「スマイルコンタクトファインフィット」は、コンタクト装着時にレンズに直接1～3滴つけるだけで、高分子とアミノ酸成分のうるおいの膜が瞳とレンズの間に作用。レンズのゴロゴロ感などの異物感をおさえ、装着を容易にして、ふんわりとしたレンズのフィット感を実現します。

毎日のコンタクトライフを快適にするアイテムです。

## ●スマイルコンタクトファインフィットの作用と特徴

1. **レンズと瞳の間のクッション作用でレンズが瞳にやさしくフィットします。**  
高分子とアミノ酸成分からなる適度な粘度の“うるおいの膜”が、レンズと瞳の間に働き、レンズが角膜にあたるのをやわらげて、レンズ装着を容易にします。
2. **レンズのくもりを防ぎます。**  
タンパクなどのレンズ吸着防止に優れた成分を配合しています。
3. **全てのコンタクトレンズ(ソフト・ハード・O<sub>2</sub>・使い捨て)に安心して使えます。**

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. **次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
2. **次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください**  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

## ● 効能

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にします。

必ず裏面もお読みください

## ● 用法・用量

コンタクトレンズの両面を1回1～3滴でぬらしたのち装着してください。

① レンズに直接、液をつける。



② そのままレンズを瞳に装着する。



※装着後、液が目から溢れた場合には、清潔なガーゼで軽くふき取ってください。成分の結晶が目周囲に付着することがあります。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤を用いてコンタクトレンズを装着した後に、点眼薬を使用する場合は、30分以上あけてご使用ください。

## ● 成分(100mL中)

有効成分	含量
ヒプロメロース	1.0g
L-アスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	1.0g
塩化ナトリウム	0.6g
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	2.0g

\*添加物として、エデト酸Na、シクロデキストリン、塩化ベンザルコニウム、pH調整剤を含む。

## ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 開封後、容器の保管状態によっては、成分の結晶が容器の先に白くつくことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (6) 使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

【コンタクトレンズご使用の際の注意】\*コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。

\*コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、洗浄については十分に心がけてください。

\*コンタクトレンズご使用の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。

### ■ お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**ライオン株式会社**

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7